

## Médaille iVi sensible aux chutes<sup>(\*)</sup>

### Qu'est-ce qu'un iVi ?

Il s'agit d'un déclencheur de téléassistance intelligent. Il fonctionne comme tout autre émetteur classique : le bénéficiaire, peut appuyer sur le bouton d'alarme situé sur l'émetteur, ceci 24h sur 24 et à n'importe quel endroit de son domicile. La protection supplémentaire qu'offre l'émetteur iVi est qu'il procède à un appel automatique lorsqu'il détecte une chute.

Ainsi l'appel est émis même si le porteur n'est pas en mesure d'appuyer sur le bouton d'alarme (perte de conscience).

### Comment cela fonctionne-t-il ?

L'émetteur iVi est facile d'utilisation. Le bénéficiaire peut à tout moment, par simple pression du bouton d'alarme, déclencher un appel vers la centrale d'écoute en cas de besoin.

De plus, l'iVi dispose d'une fonction détection de chute grâce à des capteurs intuitifs (accéléromètre, baromètre) qui pourront générer automatiquement un appel d'aide lors de la détection d'une chute<sup>(\*)</sup>.

### A qui s'adresse ce dispositif ?

Tous les bénéficiaires peuvent avoir besoin d'un déclencheur de téléassistance intelligent.

Le médaillon iVi est idéal pour les personnes âgées ou malades qui connaissent des troubles de l'équilibre ; celles qui sortent de l'hôpital et qui nécessitent une attention particulière ; ou encore les personnes souffrant de maladies chroniques telles que l'épilepsie ou le diabète.

### Le matériel



- Esthétique, discret, étanche, portée de 120m.
- Conception ergonomique avec finition mate.
- Bouton d'alarme manuel.
- Remplacement batterie pratique<sup>(1)</sup>.
- Nettoyage facile.

### Souscription

Le médaillon intelligent iVi est un complément au dispositif de téléassistance du domicile.

Le tarif mensuel est de seulement 3,59€ TTC<sup>(2)</sup>.

- (1) La maintenance est assurée par VITARIS. Nos installateurs procèdent au changement de la pile. La batterie a une durée de vie de 10 à 12 mois environ. Lorsque le niveau de batterie est faible, l'émetteur va alerter automatiquement le centre d'écoute.
- (2) Tarif mensuel pour l'année 2016. Prix révisé chaque année au 1<sup>er</sup> janvier.



<sup>(\*)</sup> Les situations de chutes sont multiples et variées, c'est pourquoi certaines d'entre elles ne pourront pas être détectées par l'iVi.

Par exemple, il est peu probable que l'iVi détecte la chute d'une personne qui tombe lentement de sa chaise ou qui se laisse glisser progressivement contre un mur. Le bénéficiaire doit dans tous les cas essayer de presser le bouton d'alarme.

